


# K-System

Simplification de la greffe osseuse

**1** Prélever

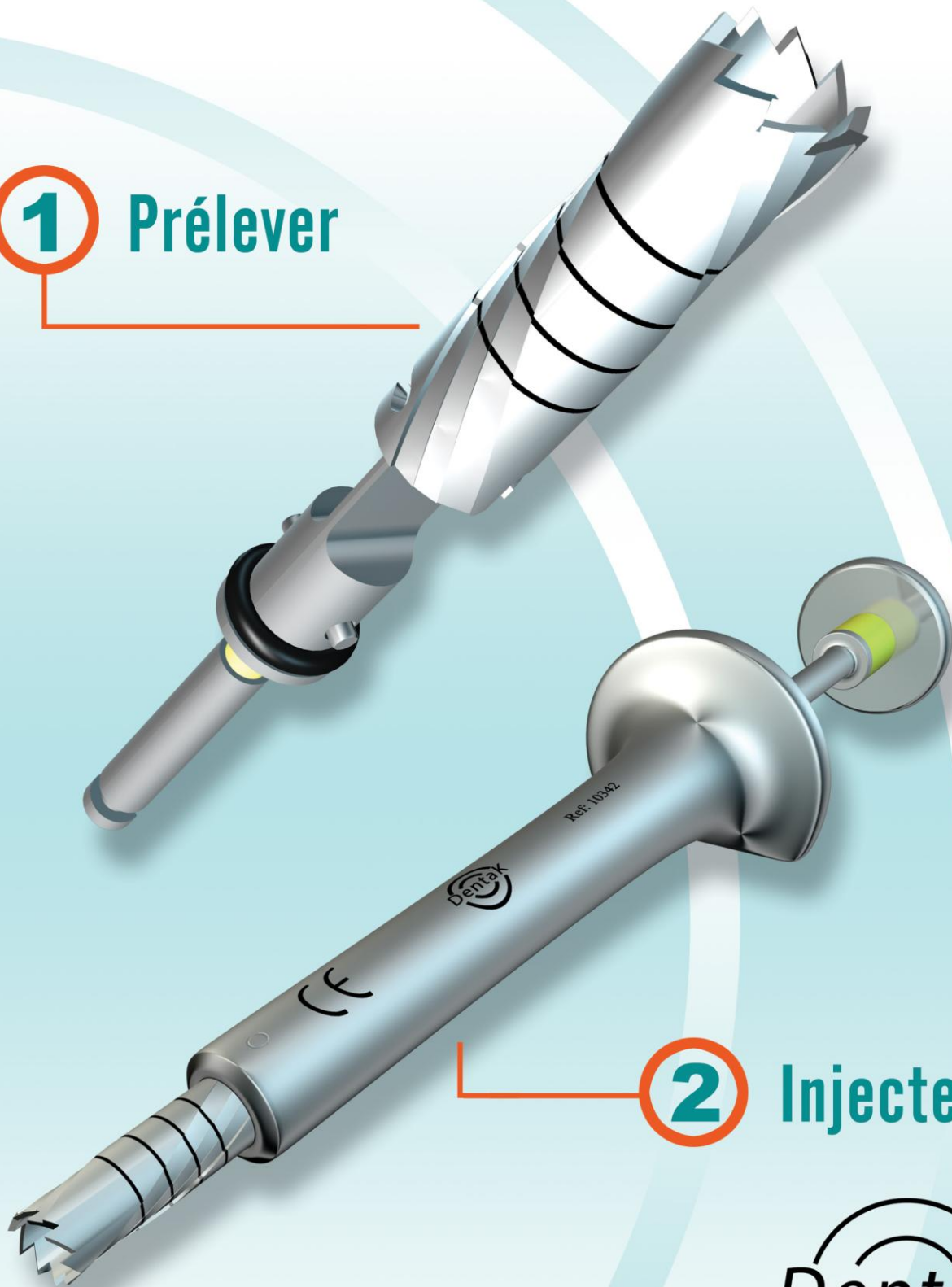

**2** Injecter

Dentak

# K-System Greffe osseuse en deux temps

## 1 Prélever




Le FTBO permet le prélèvement d'os sous forme de broyat osseux

Le foret lame est déconnecté du tube trépan



L'os broyé est contenu dans le tube trépan

Le tube trépan contenant l'os broyé est monté sur la seringue

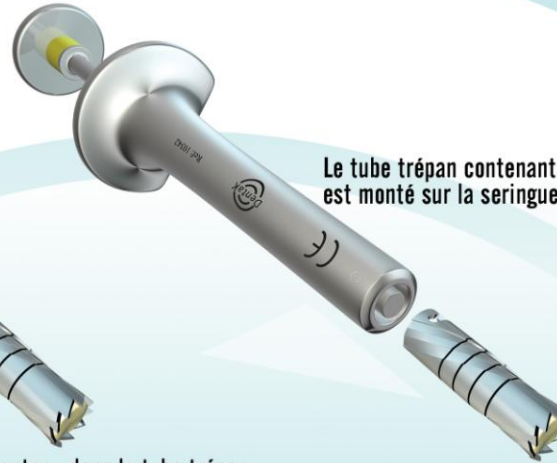

## 2 Injecter



L'os broyé est déposé au niveau du site receveur de la greffe osseuse, par simple injection

## Foret Trépan Broyeur d'Os (FTBO)



- ◀ Le FTBO est le premier foret de sa génération. Son système breveté, combinant un tube trépan et un foret lame permet de prélever et de broyer une carotte osseuse en une étape
- ◀ Graduations à 5, 7, 9 et 11 mm
- ◀ Rainure spiralée amenant le liquide de refroidissement à l'extrémité travaillante de l'instrument
- ◀ Baïonnette
- ◀ Code couleur
 

<span style="color: red;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>	<span style="color: blue;">■</span>	<span style="color: green;">■</span>
3,2 mm	4,2 mm	5,2 mm	6,2 mm
(Correspondant au diamètre externe du FTBO)			
- ◀ Utilisation sur contre-angle avec une irrigation externe

Breveté :  
EP 1335672  
US 6942669

## Indications

- ▶ Chirurgie parodontale :
  - Comblement d'un défaut osseux
  - Comblement d'une alvéole après extraction
- ▶ Chirurgie implantaire :
  - Prélèvement d'os et préparation partielle ou complète du site implantaire
  - Technique d'implantation immédiate
  - Technique de Summers
  - Technique de soulèvement de la membrane sinusienne
  - ...

**Simplicité** : Prélever avec le FTBO, injecter avec la seringue

**Sécurité** : Diminution des risques de contamination bactérienne (notamment avec la salive)

## Kit K-System

Kit K-system n°1 ..... Ref : 13242



Kit K-system n°2 ..... Ref : 25262



## K-System

K-System 3.2 ..... Ref : 10032



K-System 5.2 ..... Ref : 10052



K-System 4.2 ..... Ref : 10042



K-System 6.2 ..... Ref : 10062



## FTBO

FTBO 3.2 mm ..... Ref : 10132



FTBO 5.2 mm ..... Ref : 10152



FTBO 4.2 mm ..... Ref : 10142



FTBO 6.2 mm ..... Ref : 10162



## Clé

Clé de démontage  
pour FTBO ..... Ref : 13546



## K-System Blender

Produit additionnel du K-System 5.2 ..... Ref : 30052

Nouveauté :  
mélangeur d'os autogène  
et de biomatériaux



CE 0124

DENTAK - 122 Avenue de la République - 75011 Paris - France - contact@dentak.com - www.dentak.com